

## LENTE DE CONTACTO BLANDAS

### Descripción y finalidad de uso

Lentes de contacto blandos indicados para la corrección visual de miopía, hipermetropía, presbicia, o astigmatismo.

### INSTRUCCIONES DE USO

Lea esta información atentamente y consérvela para futura referencia.

Consulte en la caja la fecha de vencimiento

### CONTRAINDICACIONES (Cuándo no usar los lentes)

- En caso de inflamación o infección de la superficie del ojo
- Cualquier enfermedad del ojo que afecte la córnea, la conjuntiva o los párpados
- Sequedad ocular grave
- Disminución de la sensibilidad de la córnea
- Reacciones alérgicas en las superficie ocular o zonas adyacentes
- Alergia a cualquier ingrediente presente en la solución que se utilice para el cuidado de cualquier lente
- Enrojecimiento o irritación de los ojos
- Infección activa de la cornea

### ADVERTENCIAS

- Los problemas con los lentes de contacto y productos para el cuidado de los lentes podrían dar lugar a lesiones oculares serias.
- El uso correcto de los lentes y de los productos para el cuidado de los mismos, incluidos los estuches portallentes son fundamentales para el uso seguro de estos productos.
- Es fundamental que los pacientes sigan las instrucciones de su profesional del

cuidado de la salud visual y todas las instrucciones que se señalan en los instructivos de las lentes y de los productos para el cuidado de las lentes.

### PRECAUCIONES

- No usar los lentes después del período recomendado por el profesional del cuidado de la vista.
- Usar siempre soluciones recomendadas y seguir las instrucciones incluidas en los empaques de las mismas.
- Se deben realizar visitas de seguimiento al profesional del cuidado de la salud visual para asegurarse que se ha mantenido la salud ocular.

### REACCIONES ADVERSAS

- Ardor o irritación en los ojos
- Incomodidad
- Sensación de cuerpo extraño en el ojo
- Lagrimeo
- Secreciones oculares inusuales
- Enrojecimiento de los ojos
- Disminución de la agudeza visual
- Visión borrosa
- Sensibilidad a la luz
- Sequedad ocular.

Si el paciente observa alguna de las reacciones anteriores se debe quitar los lentes de inmediato. Si la molestia o el problema se desaparece revisar los lentes cuidadosamente. Si se observa algún daño no volver a colocarlos en el ojo. Si las lentes no están dañadas se podrán colocar de nuevo después de lavar, enjuagar y desinfectar. Si el problema continúa, el paciente se deberá retirar inmediatamente los lentes y consultar al profesional de la salud visual.

### PRESENTACION

Cada lente se presenta en un blíster estéril. El blíster contiene las especificaciones, el número de lote de fabricación y la fecha de caducidad de las lentes.

NO UTILIZAR SI EL BLISTER ESTA ROTO O EL SELLO FUE DAÑADO

### UTILIZACION

Antes del uso:

- Antes de tocar tus ojos o los lentes de contacto, lava bien tus manos.
- Enjuaga y seca bien tus manos con una toalla y asegúrate que queden libres de residuos.

### Cómo colocarte los lentes de contacto

1. Verifica que el lente se encuentre del lado correcto, en forma de copa con los bordes hacia adentro.



2. Con tu otra mano, levanta con cuidado tu párpado superior para no parpadear.
3. Con cuidado baja tu párpado inferior con los otros dedos de la mano.
4. Lleva el lente de contacto hacia tu ojo, con calma y firmeza.



5. Suelta con cuidado el párpado y cierra el ojo un momento para permitirle al lente acomodarse.
6. Sigue los mismos pasos para el otro ojo. Los lentes de contacto no deben ser compartidos

### Cómo retirarte los lentes de contacto

1. Antes de tocar tus ojos o los lentes de contacto, lava bien tus manos.
2. Enjuaga y seca bien tus manos con una toalla y asegúrate que queden libres de residuos.
3. Mira hacia arriba y con cuidado baja tu párpado inferior con el dedo medio de la mano.
4. Acerca despacio tu dedo índice al ojo hasta que toques el borde inferior del lente.
5. Desliza el lente a la parte inferior blanca del ojo.
6. Con suavidad toma el lente entre tu dedo índice y pulgar, y retíralo.



7. Retira el lente del otro ojo de la misma manera.
8. Descarta los lentes desechables diarios o limpia y desinfecta los lentes si son reusables.

El fabricante CooperVision  
Hamble, SO31 R4F, UK  
Scottsville, NY 145 46, USA  
Juana Díaz, PR 00795, USA  
[www.coopervision.com](http://www.coopervision.com)

## LENTE DE CONTATO GELATINOSAS

### INSTRUÇÕES DE USO

#### INDICAÇÕES FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA

Lentes de contato gelatinosas indicadas para correção visual de miopia, hipermetropia, presbiopia, ou astigmatismo.

#### CONTRA INDICAÇÕES (MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAR)

**NÃO UTILIZAR** as lentes de contato quando houver qualquer uma das seguintes condições:

- Inflamação ou infecção aguda ou subaguda da câmara anterior do olho.
- Qualquer doença ocular, ferimento ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras.
- Insuficiência de secreção lacrimal (olhos secos).
- Hipoestesia da córnea (sensibilidade da córnea reduzida)
- Qualquer doença sistêmica que pode afetar o olho ou pode ser exacerbada pela utilização de lentes de contato.
- Reações alérgicas das superfícies oculares ou anexas
- Qualquer infecção ativa na córnea
- Se os olhos ficarem vermelhos ou irritados

#### AVISOS

#### Avisos pertinentes à utilização de lentes de contato

- Problemas com as lentes de contato ou produtos para cuidado com as lentes podem resultar em danos sérios aos olhos.
- A utilização e cuidados adequados com as lentes de contato e com os produtos de cuidado das lentes, incluindo os porta lentes são essenciais para a utilização segura desses produtos.

- É essencial que os pacientes seguir as instruções do seu oftalmologista e todas as instruções listadas nas lentes instruções e produtos para cuidados lentes.

#### PRECAUÇÕES

- **Nunca** utilizar lentes além do período recomendado pelo oftalmologista.
- **Sempre lavar e enxaguar as mãos antes de manusear as lentes**
- Sempre use soluções recomendadas e siga as instruções incluídas nas embalagens delas mesmas. Cuidadosamente seguir as instruções de manuseio, inserção, remoção e utilização contidas nesta bula e os prescritos pelo oftalmologista.
- **Sempre** contatar seu oftalmologista para garantir a manutenção da saúde ocular.

#### EFEITOS ADVERSOS

Atentar para o fato de que os seguintes problemas podem ocorrer quando utilizar lentes de contato:

- Os olhos podem doer, arder e/ou coçar (irritação).
- Pode haver menor conforto
- Pode haver uma sensação anormal de algo presente nos olhos (corpo estranho, área arranhada).
- Pode haver excesso de lacrimação,
- Secreções não usuais ou vermelhidão dos olhos.
- Pode haver diminuição da acuidade visual,
- Visão turva, arco íris ou halos ao redor de objetos,
- Sensibilidade à luz (fotofobia)
- Olhos ressecados

Se algum dos sintomas acima for verificado:

**Remover imediatamente as lentes.**

Se o desconforto ou o problema parar, deve-se olhar as lentes de perto.

Se as lentes estiverem danificadas de alguma forma, não se deve colocar as lentes nos olhos. Deve-se descartar as lentes e colocar novas.

Se as lentes estiverem sujas, com um cílio ou corpo estranho estiver nelas, ou o problema parar e as lentes parecerem não danificadas, deve-se descartar as lentes e colocar novas.

Se o problema continuar, não se deve colocar as lentes novamente e deve-se consultar imediatamente o oftalmologista.

#### APRESENTAÇÃO

As lentes de contato são embaladas individualmente em blisters, conservadas em solução salina tamponada, selados com folha laminada flexível de alumínio e esterilizadas por autoclave a vapor. Os blisters são rotulados, indicando especificação (quando aplicável), número do lote e data de validade.

**NÃO UTILIZE SE O BLISTER estiver violado.**

#### UTILIZAÇÃO

##### ANTES DO USO

Lave sempre as mãos antes de manusear as suas lentes.

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja aberta ou danificada.

As lentes de contato não devem ser compartilhadas.

##### COLOCAÇÃO DAS LENTES NOS OLHOS

1. Para evitar misturar as lentes, manuseie sempre a mesma lente em primeiro lugar
2. Antes de colocar a lente, certifique-se que não esteja virada na direção oposta. Coloque a lente no seu dedo indicador para verificar o formato.



3. Utilizando o dedo médio, faça deslizar a pálpebra inferior. Com o dedo indicador da outra mão, puxe a pálpebra superior. Coloque a lente. Repita a operação para o outro olho.



##### REMOÇÃO DAS LENTES

1. Separe as pálpebras com o dedo médio de cada mão.
2. Olhe para cima e com o dedo indicador da outra mão, deslize a lente.
3. Comprima ligeiramente a lente até que esta se descole e retire-a com o polegar e o indicador. Repita a operação para o outro olho.



##### IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR NO BRASIL

CooperVision do Brasil Ltda.  
Av. Marques de São Vicente, 2800 – Água Branca  
CEP.05014-000 - São Paulo – SP  
**BRASIL**

ESTERILIZADO POR AUTOCLAVE A VAPOR.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA